



Specifiche Tecniche di OM[®]

Alimentazione	220V 50-60 Hz Optional 110V 50-60 Hz	
Assorbimento Totale	300 Watts	
Dimensioni Totali	39 x 39 x 105 cm.	
Peso Totale	35 Kg.	
MICRODERMOABRASIONE		
Assorbimento Pompa	100 Watts	
DIELETTROFORESI		
Frequenza Minima	300 Hz	
Frequenza Massima	3000 Hz	
Ampiezza Massima	55 V	
Forma d'Onda	Sinusoidale modulata	
RADIOFREQUENZA BIPOLARE - INFRAROSSI		
	Applicatore small	Applicatore large
Area Trattata	8x12 mm	30x30 mm
Densità energia RF	30 - 120 J/cm ³	5 - 50 J/cm ³
Fluenza Ottica	fino a 10 J/cm ²	fino a 10 J/cm ²
Spettro Luce	700 - 2000 nm	700 - 2000 nm
Temperatura Raffreddamento	5 o 10 °C	5 o 10 °C
Tasso di Ripetizione Impulsi	fino a 1 Hz	fino a 1 Hz

CHI È SMEI ?

Fondata nel 1988, SMEI è attualmente una delle più importanti società italiane di produzione e commercio di apparecchiature, attrezzature e prodotti destinati al settore Medico-Estetico. Il nostro obiettivo è quello di offrirvi il meglio di quanto tecnologicamente e scientificamente esista nell'ambito della medicina estetica, della dermatologia, della chirurgia plastica e dell'estetica professionale.

Anni di ricerca, di sperimentazione e di partecipazione ai più importanti congressi medico-scientifici nazionali ed internazionali, rappresentano la nostra forza e la certezza di fornirvi prodotti di una qualità e un'affidabilità ineguagliabili.

Oltre a un servizio tecnico veloce ed efficiente, abbiamo cura dei nostri clienti con corsi di aggiornamento teorici e pratici sull'uso delle apparecchiature e dei prodotti, informazione continua con studi clinici, supporto marketing con materiale pubblicitario e promozionale. La continua ricerca di nuove tecnologie, apparecchiature e prodotti all'avanguardia, in grado di offrire risultati ed affidabilità, l'alta qualità dei servizi e l'assistenza al cliente sono le caratteristiche che permettono alla nostra azienda di poter soddisfare le più sofisticate esigenze del mercato Medico ed Estetico.

SMEI , un'azienda che crede in ciò che offre.



Smei S.R.L. - Via F. Negri, n.15 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142.455445 Fax 0142.455446 | www.smei.it - info@smei.it N. Verde 800.812.017

TRATTAMENTO SMAGLIATURE
TONIFICAZIONE VISO E CORPO
TRATTAMENTO CELLULITE
DIMINUZIONE ADIPOSITÀ

OM[®] Ricerca tecnologica e design tutto italiano per trattamenti estetici innovativi.



om
l'armonia
del corpo.



SERVIZI MEDICO ESTETICI ITALIANI S.r.l.



tre azioni per combattere
le smagliature

Esfoliare

Nutrire

Stimolare

Microdermoabrasione Controllata

Il manipolo per la microdermoabrasione controllata (MDA) è stato studiato specificatamente per abradere dolcemente la cute con aspirazione regolabile a seconda degli inestetismi da trattare.

La MDA controllata basa la propria azione sulla risposta biologica dell'organismo: l'asportazione di strati dell'epidermide, effettuata dolcemente in modo meccanico dalle particelle di ossido d'alluminio sterili, determina una reazione infiammatoria che precede il riparo dei tessuti.

Asportando solo una parte della cute, con una serie di passaggi ripetuti, il derma funziona da tessuto guida per le nuove fibrille che si depositeranno in maniera ordinaria, congrua al tessuto sottostante.

Con la MDA controllata è possibile trattare efficacemente gli esiti di acne, piccole cicatrici e soprattutto le **smagliature**. Il trattamento provoca un ispessimento del derma, un rafforzamento della trama e il restringimento del vallo sottostante la smagliatura stessa.



om

I suoi manipoli, studiati per trattare specifici inestetismi della pelle, sono tutti a scomparsa. Un apparecchio divino, dal minimo ingombro e dai risultati certi.

Dielettroforesi Transdermica

La Dielettroforesi Transdermica consente la veicolazione di sostanze attive idrosolubili e ionizzabili attraverso gli strati cutanei, nella massima sicurezza senza pericolo di lederli.

Utilizzando correnti pulsate e modulate, grazie alla particolare forma d'onda che varia nell'ampiezza rispetto ad altri dispositivi presenti sul mercato, è possibile far penetrare i principi attivi a diverse profondità.

Il manipolo consente di far penetrare nel tessuto target elevate concentrazioni della sostanza veicolata, senza interferire su quelli circostanti, lasciandoli preservati in maniera assoluta.

L'unico ed innovativo sistema di dielettroforesi transdermica è caratterizzato dalla presenza all'interno di Om di due canali indipendenti che consentono di trattare due zone diverse o due clienti contemporaneamente, permettendo all'operatore di scegliere ed eseguire differenti trattamenti con un unico apparecchio.

Grazie alla Dielettroforesi Transdermica, utilizzando specifici principi attivi opportunamente scelti è possibile trattare **smagliature**, ipotonie muscolari, ipotonie tissutali, invecchiamento cutaneo biologico e da luce solare.



Manipolo per la Microdermoabrasione.



Manipolo per la Dielettroforesi Transdermica.

Radiofrequenza Bipolare e Luce a Infrarossi

La Radiofrequenza Bipolare e la Luce a Infrarossi, impiegate sinergicamente, trattano efficacemente le **smagliature**, la lassità cutanea e le piccole rughe, rassodando tutte le parti del corpo.

Attraverso l'azione di RF e IR si stimola la sintesi del collagene a lungo termine e la contrazione delle fibre di collagene esistenti per una pelle immediatamente più soda, distesa e tonificata.

Il sistema integrato di raffreddamento (da 5° a 10°C) abbassa la temperatura dell'epidermide, permettendo alla Radiofrequenza Bipolare e alla Luce a Infrarossi di penetrare a profondità controllata, predefinita dalla distanza degli elettrodi.


Il manipolo small, specifico per il viso, dispone di una superficie di trattamento di 8 x 12 mm e può riscaldare il derma sino ad una profondità da 2,5 a 4 mm.

Il manipolo large, studiato per il corpo, tratta una superficie di 30 x 30 mm, raggiungendo una profondità di 3 mm per la Luce a Infrarossi e dai 2 ai 15 mm per la Radiofrequenza Bipolare.

E' possibile, inoltre, ridurre gli accumuli adiposi, trattando la pelle a "buccia d'arancia". L'applicatore, attraverso il riscaldamento dei tessuti in profondità, accresce la diffusione dell'ossigeno a livello intracellulare, riducendo l'infiammazione.

Ne consegue una riduzione o contrazione delle cellule adipose che ritornano al loro stato naturale.

Il risultato è una riduzione della circonferenza dell'area trattata ed un aspetto più levigato ed uniforme della superficie della pelle.

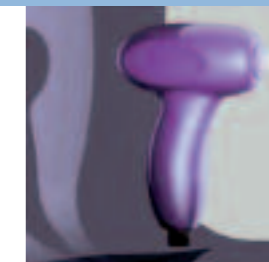

Manipolo ad immissione di Radiofrequenza Bipolare e Luce a Infrarossi.

MICRODERMOABRASIONE CONTROLLATA DIELETTROFORESI TRANSDERMICA RADIOFREQUENZA BIPOLARE LUCE A INFRAROSSI

om® dalla sillaba sacra simbolo dell'infinito nasce om®, l'innovativo brevetto tutto italiano per il trattamento delle smagliature, la diminuzione delle adiposità, il trattamento della cellulite e la tonificazione di viso e corpo. Om® è la prima apparecchiatura che sposa una linea impeccabile con un design assolutamente esclusivo, riunendo 4 tecnologie in una sola macchina.